



Desinfioiva sumutuspatriuuna

Kertakäyttöinen
sumutuspatriuuna on tehokas ja
turvallinen tapa tilojen,
kulkuneuvojen ja välineiden
desinfiointiin



TECcare **CONTROL** sumutuspatriuuna on tehokas. Virallisilla EN-standardeilla itiotehoinen Likainen Ympäristö - olosuhteissa.

Kertakäyttöinen pullo on helppo ja nopea käyttää ja sumu leviää tasaisesti ympäri desinfioitavaa tilaa. Tuotetta voidaan tarpeen mukaan käyttää ennen tai jälkeen tilan siivouksen. Sumu desinfioi myös ilmassa leijuvat mikrobit, jotka tulisi huomioda työturvallisuuden ja kontaminaatoriskin kannalta esim. eritetahran poistossa ja eristyshuoneissa.

Tuotteelle on myönnetty Suomessa Allergiatunnus eli käsittelyn jälkeen tila turvallinen käyttää ja pH-neutraalina käyttö ei vahingoita pintamateriaaleja.

Läpäissyt esim. (ei tyhjentävä luettelo)

- EN 1276, 13727, 13624, 14476, 1650, 13704, 14348
- ASTM Corrosion Testing
- OSHA; Bloodborne Pathogen Standard
- Air Craft approval
- Acute Toxicity Standards; non-toxic
- EPA hyväksytty tuote mm. terveydenhuoltoon ja ambulanssien desinfiointiin
- CE merkitty lääkinnällinen laite

Käyttöohje tilojen desinfiointi:

1. Aseta sumutuspatriuuna telineeseen huoneen nurkkaan, suunta huoneen keskelle
2. Sulje ovet ja ikkunat
3. Aloita sumutus painamalla suutinta
4. Poistu huoneesta ja sulje ovi
5. Huoneeseen voi palata kun sumu on laskeutunut pinnoille

Käyttöohje ambulanssit ja muut kulkuneuvot:

1. Aseta sumutuspatriuuna telineeseen ajoneuvon takaosaan, suunta vastakkaiseen nurkkaan
2. Sulje ovet ja ikkunat
3. Aloita sumutus painamalla suutinta
4. Poistu ajoneuvosta ja sulje ovi
5. 30 minuutin kuluttua ajoneuvossa voi aloittaa tuuletuksen mikäli tarpeellista



Pakkauskoot :
150ml (18m3)
450ml (50m3)

Tuotekoodit:
TEC-OS-42-00-150
TEC-OS-42-00-450



Kimmoisa Oy
050 422 6344
teccare@kimmoisa.fi
www.kimmoisa.fi