

JONASET ATEMLUFWÄRMER

Der Jonaset Atemluftwärmer hilft Ihnen, sich auch bei kaltem Wetter draußen zu bewegen. Der Wärmer enthält ein Edelstahlgitter, das die Wärme der Ausatemluft speichert und sie zur Erwärmung der Einatemluft nutzt. Gleichzeitig wird die trockene Frostluft angenehm befeuchtet.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Befestigen Sie den Jonaset Wärmer an der Innenseite eines Halsschutzes, einer Kapuze oder eines Schals. Je nach Wetterlage und Einsatzzweck können Sie das dünnere weiße oder das leistungsstärkere blaue Modell verwenden.
2. Platzieren Sie den Wärmer sorgfältig vor Mund und Nase, ohne die Augen zu bedecken. Sie können das Stahlnetz vorsichtig biegen, damit es sich besser an Ihre Gesichtsform anpasst, oder bei Bedarf mit einer Schere zuschneiden. Das Gitter darf nur mit den vom Hersteller vorgesehenen Strickmaterialien bedeckt werden, die einen geringen Atemwiderstand aufweisen.
3. Brillenträger können die Metallklammer am oberen Rand biegen, um das Beschlagen der Gläser zu verhindern. Sollte es dennoch zu Beschlag kommen – etwa beim Autofahren oder in gefährlichen Situationen – ist die Nutzung sofort zu beenden.
4. Das Produkt dient ausschließlich zur Erwärmung der Atemluft und filtert keine Feinstaubpartikel.
5. Der Wärmer ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Nach jedem Gebrauch unter fließendem Wasser abspülen. Für eine gründlichere Reinigung je nach Nutzungshäufigkeit 2–3 Mal pro Woche mit Flüssigreiniger säubern.
Hinweis: Die weichen Ränder des Wärmers dürfen nicht Temperaturen über 60 °C ausgesetzt werden.
6. Der Wärmer besteht aus hautfreundlichem Polyethylenschaum und säurebeständigem Edelstahlgitter. Entsorgen Sie das Produkt im Restmüll, die Metallteile gehören in den Metallmüll.